

LIGASANO®

CE1275

PZN 7235516 Art.-Nr. 15090



Innenhand-Verband

aus LIGASANO® weiß und LIGASANO® grün

Packungsinhalt:

2 Stück Spiralrollen aus LIGASANO® grün,
Durchmesser ca. 8cm, Breite 10cm
10 Stück Innenhand-Verband aus LIGASANO® weiß,
ca. 29x12x1cm

LIGASANO®
by LIGAMED® *wirkt einfach*

PZN 7235516 Art.-Nr. 15090

1

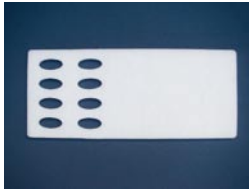


Bild 1:

Der Hand-Innenverband aus LIGASANO® weiß hat zwei vorgefertigte Reihen mit je vier Aufnahmen für die Finger.

2



Bild 2:

Durch Abknicken werden die beiden Reihen übereinander gebracht und die Finger durch die beiden Lagen gesteckt.

3



Bild 3:

Bitte beachten: Das kürzere Ende liegt immer in Richtung Handfläche.

4



Bild 4:

Intertrigo, Druckstellen und Verletzungen in den Handinnenflächen und zwischen den Fingern können so behandelt bzw. verhütet werden. Der mechanische Reiz, den LIGASANO® weiß auf die Handinnenflächen ausübt, wirkt lokal durchblutungsfördernd, abgestorbene Hautzellen lösen sich (Peeling).

5



Bild 5:

Zusätzlich kann eine Spiralrolle aus LIGASANO® grün eingelegt werden, um einen Trainingseffekt zu erreichen oder um die Hand durch dauernden leichten Gegendruck von innen sogar wieder ein Stück zu öffnen. Wegen der besonderen Materialeigenschaften wird dabei einem Wärme- oder Feuchtestau vorgebeugt.

6



Bild 6:

Die Spiralrolle aus LIGASANO® grün kann sowohl im Durchmesser als auch in der Festigkeit verändert werden. Wenn die Rolle geöffnet und enger wieder zusammengerollt wird, entsteht ein geringerer Durchmesser mit höherer Festigkeit. Wird ein kleinerer Durchmesser ohne höhere Festigkeit gewünscht, kann ein Teil der Außenbahn gekürzt werden.

7

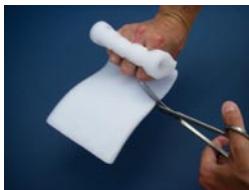


Bild 7:

Auch bei ganz geschlossenen Händen lässt sich der LIGASANO® Innenhand-Verband einfach anwenden und anpassen, mit den bekannten Vorzügen der Vermeidung von Haut-Haut-Kontakt.

8



Bild 8:

Eine wirksame Fixierung kann mit LIGAMED® Fix erfolgen.

Der Innenhand-Verband aus LIGASANO® weiß ist ein Einwegprodukt, das nach einigen Tagen seine Eigenschaften verliert und dann als Hausmüll (außer infizierte Verbände) entsorgt wird.

Die Spiralrollen aus LIGASANO® grün können längere Zeit verwendet werden (z.B. als Handtrainer), sind waschbar bis zu 90°C und mit Wasserdampf sterilisierbar (bei Bedarf bitte gesonderte Informationsbroschüre anfordern).